

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20201218-01
発行日: 令和 2年 12月 18日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500457
作業年月日	令和 2年 12月 18日		作業時間:	/ Hr
顧客名	阿部クリニック 様		TEL:	0244-35-2553
所在地	福島県相馬市中村1丁目14-2		ご担当	様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売(株)		ご担当	様
納入年月日	2019 年 12月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検 及び 消耗品交換

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 993
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. 0304 / T/2A

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

給水フィルター(B201、経年)交換

装置 情報	交換後運転回数: 204 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒(総運転回数): 3 / 消毒(洗剤洗浄あり): 0	
	消毒+アル(総運転回数): 204	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 38	
	リークチェック: 205	自己洗浄: 125	アルコール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 18 日

ご署名

宮本 美保

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

R2.12.18