

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-27055

No. 200303

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	まつざき内科胃腸科クリニック 様	機番	100063
環営	所在地	福島県田村市常葉町西向字米粉原 8	納入日	2010年09月28日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2020年01月21日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年02月27日

修理依頼・不具合内容

1/21 エアライン低圧異常（E:209）※ および 排水ポンプ点検

※エアポンプの送気圧力が規定より低下すると発生する異常です

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常が再現することを確認しました。リークチェックコネクタ（本体側）から空気が漏れて圧力が下がったことが原因でした。これと劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.72 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：95 殺菌：59、殺菌＋アルコール：3612、リークチェック：3671
自己洗浄：1856、アルコール単独：3、エア単独：2

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	リークチェックコネクタ（本体側）	1 枚	
2	タッチパネル	1 台	
3	排水ポンプ	1 台	
4	キャスター	4 個	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

承認

20.3.04

審査

中
20.3.4
澤

作成

R02.3.3

中澤