

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210203-01
発行日: 令和 3年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500043
作業年月日	令和 3年 2月 3日		作業時間: / Hr
顧客名	小橋クリニック 様		TEL: 0248-72-1555
所在地	福島県須賀川市仁井田字大谷地 172-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 1月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 806
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.175 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 504 更新 (リセット) (実施)・未実施		消毒 (総運転回数): 174 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 173	
	消毒+アル (総運転回数): 330		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 330	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 242	アルコール単独: 3	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 51912335			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ: チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒	アルコールキャップ	☒
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

令和 3年 2月 3日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 藤田 中かり 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R3.2.3 大友