

点検・修理報告書

管理 No. 210291

発行日: 2021年10月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月17日 作業時間: 8 Hr
顧客名	ささき歯科クリニック 様 TEL: 019-687-1110
所在地	岩手県滝沢市鶴飼狐洞1-457
販売店	ササキ機盛岡支店
納入年月日	2016 年 8 月 28 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100184	運転回数: 4274回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・チャンバー内に水が残る。		
原因		
・工場にて繰り返し何度も運転しましたが、水の残留は確認できませんでした。		
処置、作業内容		
・前方から後方に水が流れるように少し傾きが必要です。		
アジャスタの高さを39mmに調整いたしました。(従来より2mm高い)		
特記事項		
・SD基板が故障しておりましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SD基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 12 日

ご署名 佐々木 直光 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	中村
'21/10/07	'21/10/07	'21/10/07