

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200612-G
発行日：令和2年 6 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300581
作業年月日	令和 2 年 6 月 12 日		作業時間： Hr
顧客名	阿部医院 様		TEL： 0191-47-3898
所在地	岩手県一関市東山町長坂字町379		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 一関支店		ご担当 菅原 様
納入年月日	平成 27 年 6 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴なし			
不具合原因、作業内容			
定期点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 635
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.09 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数： 130	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 36 /	殺菌/消毒+アル： 17 /
	リークチェック： 50 /	自己洗浄： 102	アルコール単独： 5	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計	18013014	☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		〒020-0202 岩手県一関市東山町長坂字町379番地 医療法人弘誠会 阿部医院 理事長 阿部 昭弘 ご署名 TEL 0191-47-3898 FAX 0191-47-9808	
修理業者	新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL：022-288-4660	責任技術者	作業者 R2.6.12