

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210317-5-1

発行日: R3 年 3 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500240
作業年月日	3 年 3 月 17 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	仙台桃太郎クリニック 様		TEL: 022-771-5155
所在地	宮城県仙台市泉区明石南6丁目13-3		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 佐藤 様
納入年月日	2019年 3月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検・フィルター交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 788
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.80 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 436 更新 (1セット) 実施 ☒ 未実施 ☐ 消毒(総運転回数): 180 / 消毒(洗剤洗浄あり): 173
	消毒+アル(総運転回数): 639 / 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 639
	リークチェック: 522 自己洗浄: 543 アルコール単独: 0 エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 5191322			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1	給水フィルタ(活性炭)	☒ 1
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 3 月 17 日

ご署名

岩印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R3 3/17 佐藤