

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20210323-01

発行日:

令和 3年 3月 23日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500486
作業年月日	令和 3年 3月 23日		作業時間:	/ Hr
顧客名	よしおか内科胃腸科 様		TEL:	0246-22-8500
所在地	福島県いわき市平下平窪山土内町7-5		ご担当	様
販売店	株式会社メディカルネット 様		ご担当	様
納入年月日	2020 年 3月 24日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 871
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 648	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 229	消毒 (洗剤洗浄あり): 5
	消毒+アル (総運転回数): 422	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 4		
	リークチェック: 1	自己洗浄: 234	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 1810 3316			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 3月 23日

ご署名

吉田 良二

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

大友

R3.3.23

大友