

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200707-YK

発行日： 2020 年 7 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500337
作業年月日	2020 年 7 月 7 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	ごとう医院 様		TEL： 023-626-5515
所在地	〒990-2423 山形県山形市東青田3丁目11-10		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社		ご担当 大場 様
納入年月日	2019 年 7 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 933
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 517	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数)： 156	消毒 (洗剤洗浄あり)： 155
	消毒 + アル (総運転回数)： 364		消毒 + アル (洗剤洗浄あり)： 364	
	リークチェック： 516	自己洗浄： 247	アルコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No. 51905185			排水栓	☒	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	☐		水フィルター	☒	1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1		☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 7 日

ご署名

後藤成治



修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

