

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200708-01

発行日：令和 2年 7月 8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機0ED-1000S ☒	製造番号： 300783
作業年月日	令和 2年 7月 8日	作業時間： / Hr
顧客名	くさのファミリー内科クリニック 様	TEL： 0246-28-1600
所在地	福島県いわき市平上荒川字長尾41-12	ご担当 様
販売店	株式会社メディカルネット	ご担当 様
納入年月日	平成 28年 3月 14日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指守部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 656
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 18777 → 更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 4462	殺菌/消毒+アル： 3852
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1235	アルコール単独： 6
			エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	51902103	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2 年 7 月 8 日

ご署名

菅野 美穂子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者

