

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200716-01

発行日：令和 2年 7月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号： 300040
作業年月日	令和 2年 7月 16日	作業時間： / Hr
顧客名	ふじい医院 様	TEL： 0246-56-2288
所在地	福島県いわき市泉町1-3-13	ご担当 様
販売店	株式会社シバタインテック 郡山支店	ご担当 熊田 様
納入年月日	平成 25年 7月 11日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 保守点検

不具合原因、作業内容
 指定部品及び消耗品交換

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 763
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 17870 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒： 20	殺菌/消毒+7L： 1340
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1314	アルコール単独： 1
			エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計	15112183	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1	アルコールキャップ		<input type="checkbox"/>	1
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1	マニホールド周辺チューブ		<input type="checkbox"/>	1

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2年 7月 16日
 藤井 邦彦 印
 ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
 TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
(大友)	R2.7.16 (大友)