

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210415-01

発行日: 令和 3年 4月 15日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500417
作業年月日	令和 3年 4月 15日		作業時間: / Hr
顧客名	岩崎消化器科内科医院 様		TEL: 024-554-5841
所在地	福島県福島市丸子字沢目33-3		ご担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		ご担当 様
納入年月日	2019 年 9月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品及び消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1052
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304/T12

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 780 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 242 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 9	
	消毒+アル (総運転回数): 539	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 102	
	リークチェック: 0	自己洗浄: 243	アルコール単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 17092835			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ 側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4月 15日

ご署名

羽田 智子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者



R3.4.15