

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200930-K
発行日：令和 2 年 9 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機0ED-1000S ☐		製造番号： 100039
作業年月日	令和 2 年 9 月 30 日		作業時間： / Hr
顧客名	佐々木医院 様		TEL： 018-877-2355
所在地	秋田県潟上市昭和太久保字堤の上9 1		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 秋田支店		ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ ハルス数 729
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 174	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 2074	殺菌/消毒+アル： 3
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1063	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計	18083264	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和 2 年 9 月 30 日

秋田県潟上市昭和太久保字堤の上9-1
佐々木医院 明翁堂

ご署名 佐々木 節明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2020.9.30 