

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 12 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐					製造番号： 100289
作業年月日	令和 2 年 12 月 3 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	野の花 今金診療所					TEL： 0137-82-4187
所在地	瀬棚郡今金町字今金359-12					ご担当 様
販売店	(株) アクトメディカルサービス					ご担当 細坪 様
納入年月日	2011 年 12 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
6/26, 7/3 オゾン水生成異常(E:207)
10/29 エアライン低圧異常(E:104)
11/7 ヒーテ-異常×2回(E:105)
不具合原因、作業内容
→ いわゆる汚染区域、見える所は清掃はした
定期的に「自己洗浄」をご活用下さい
定期保守パックの交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック		☒	☐
酸素ライン	エアライン	☒	☐
アルコールライン	オゾン水濃度計動作	☒	☐
オゾンセンサ	排水栓、排水ライン	☒	☐
給水ライン	細管送水ライン	☒	☐
濃度計流量	排気ライン	☒	☐
水位センサ	オゾン濃度	☒	☐
水漏れ確認	異常音、振動	☒	☐
清掃	電源コード	☒	☐
トレー	殺菌チューブ類	☒	☐
殺菌槽コネクタ	マニホールド周辺チューブ	☒	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
排水系統の汚れが気になる82あれば別料金で受入承ておきます。
Ver.0103/TOLA 運転総時計 2390 回

装置情報	交換後運転回数： 127	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 773	殺菌/消毒+7L： 987
	リークチェック： 625	自己洗浄： ☒	7Lサイクル単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

22 年 12 月 3 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	ご署名	印
		責任技術者	作業者
			吉田