

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210127-Y
発行日: 2021 年 1 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500213
作業年月日	2021 年 1 月 27 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	新城胃腸科内科 様		TEL: 0177-78-8551
所在地	青森県青森市新城平岡175-23		ご担当 様
販売店	コセキ株式会社		ご担当 桜井 様
納入年月日	2019 年 2 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1026
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.26 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置
情報

交換後運転回数: 692 更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施		消毒 (総運転回数): 1595 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 231	
消毒+アル (総運転回数): 0		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
リークチェック: 848	自己洗浄: 572	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計 ☒		1	オゾン分解触媒 ☒		1	吸盤 ☒		3
交換後 No. 16072428			排水栓 ☒		1	エアフィルター ☒		1
オゾンセンサー ☒		1	接続コネクタ; チューブ側 ☒		2	水フィルター ☒		1
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒		1			

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 27 日

ご署名 浅野 東 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者 作業者

