

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210528-YS

発行日: 2021年5月28日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500251
作業年月日	2021年 5月 28日		作業時間: 2 Hr
顧客名	あんどうクリニック 様		TEL: 0237-84-6101
所在地	山形県寒河江市大字中郷1042-2		ご担当 様
販売店	岡崎医療株式会社		ご担当 原田 様
納入年月日	2019 年 4 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 857
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver.0304 / T124

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 358	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 598	消毒 (洗剤洗浄あり): 599
	消毒+アル (総運転回数): 0		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 595	自己洗浄: 428	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 5181022			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ 側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和 3 年 5 月 28 日

ご署名 安藤嘉章



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者