

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

09-27783

No. 200915

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿	機種	OED-1000
環営	環品	顧客名	ゆとりが丘クリニック 様	機番	100041
		所在地	岩手県滝沢市土沢 541 番地	納入日	2010 年 07 月 22 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	2020 年 07 月 20 日		
計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020 年 09 月 09 日

修理依頼・不具合内容

給水異常が頻発する
※新鋭工業殿にて異常確認済み

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水栓を動かす部品（ドレンバルブ ASSY）が故障していました。異常に関する部品を交換し併せて定期保守点検を実施して復旧いたしました。

写真 1：基板、定期交換部品

写真 2：ドレンバルブ ASSY

写真 3：給水電磁弁



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：184 殺菌：44、殺菌＋アルコール：4815、リークチェック：47
自己洗浄：2039、アルコール単独：1、エア単独：2

承認



責任技術者



作成

R02.9.15
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 濃度計、オゾンセンサ、触媒、脱気フィルタ 排水栓、水槽コネクタ	1 式	
2	ドレンバルブ ASSY	1 式	DCモータ、カムを含む
3	給水電磁弁	2 個	SV4、SV5
4	コントロール基板	1 個	Ver0209/T05C

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIシバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

Ver3.1