

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210702-01

発行日：令和 3年 7月 2日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300475
作業年月日	令和 3年 7月 2日		作業時間： / Hr
顧客名	長瀬内科胃腸科 様		TEL： 0246-32-3125
所在地	福島県いわ市四倉町上仁井田字北姥田6-1		ご担当 様
販売店	株式会社すすむ器械店		ご担当 大和田 様
納入年月日	平成 27年 1月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検	
不具合原因、作業内容	
指定部品及び消耗品交換	
点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒
殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 746
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 152570	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 8886	殺菌/消毒+7L： 3322
	リークチェック： 3676	自己洗浄： 1979	7Lコールド単独： 67	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計	51903122	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	2021年 7月 2日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	長瀬慶一郎
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R3.7.2 大友