

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210914-G

発行日：令和3年 9 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301242
作業年月日	令和 3 年 9 月 14 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	もりあい内科クリニック 様	TEL： 0191-51-3322
所在地	岩手県一関市千厩町千厩字前田96-6	ご担当 様
販売店	共立医科器械株式会社水沢支店	ご担当 高橋 様
納入年月日	平成 29 年 8 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/6 水位低下異常 (E:300) 1/20 消毒時エラー発生 (E:202)
※特に不具合なし

不具合原因、作業内容

定期交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 8/10
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置情報	交換後運転回数： 293 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 2051	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： ☒ 自己洗浄： 1022	アルコール単独： 0	エア単独： ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポン水濃度計	17012828	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

岩手県一関市千厩町千厩字前田96番地9

医療法人 もりあい内科クリニック

理事長 盛 合 理

ご署名 TEL 0191-51-3322

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



Ver.3.1