

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211101-01
発行日: 令和 3年 11月 1日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500604
作業年月日	令和 3年 11月 1日		作業時間:	1 Hr
顧客名	よしだ内科 様		TEL:	0243-63-2333
所在地	福島県本宮市本宮字一ツ屋1-1		ご担当	様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		ご担当	様
納入年月日	2020 年 11月 27日	保証期間 内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

指定部品の消耗品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 858
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☐ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 83070 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 4 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 2	
	消毒+アル (総運転回数): 828	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 649	
	リークチェック: 280	自己洗浄: 17	アルコール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No. 170K0020			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ 側	☐		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 / 日

ご署名

吉田 幹 男 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

