

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 09-27778 No. 201016

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	会津西病院 様		機番	100746
環営	所在地	福島県会津若松市北会津町東小松 2335		納入日	2013年05月28日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2020年08月21日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	2020年10月14日
計					

## 修理依頼・不具合内容

8/21 排水異常 2 (E:402) 予備洗浄の排水に時間がかかると異常が出ます

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

排水ポンプが故障していました。その他 排水系統の部品と劣化した部品を交換して復旧いたしました。

写真1: 排水ポンプ

写真2: ドレンバルブASSY

写真3: 配管パッキン、フタパッキン



### [2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2: オゾン水濃度測定 (規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm) : 0.70 ppm・・正常
- 3: 出荷時の装置情報

交換後運転回数 586 殺菌: 9154、殺菌+アルコール: 1785、リークチェック: 9688  
自己洗浄: 1712、アルコール単独: 1、エア単独: 30

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	中澤
R02.10.16	

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	排水ポンプ	1台	
2	配管パッキン・フタパッキン	2式	
3	ドレンバルブASSY	1式	DCモータ、カムを含む