

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211208
発行日: 2021 年 12 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500603
作業年月日	2021 年 12 月 8 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	おおわに内科クリニック 様		TEL: 0172-47-7111
所在地	青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字大鰐105-6		ご担当 様
販売店	有限会社メディカルコーポレーション		ご担当 鈴木 様
納入年月日	2020 年 12 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴 保守点検			
不具合原因、作業内容 保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 908
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 112 更新 (リセット) 実施・未実施		消毒 (総運転回数): 3 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 1	
	消毒+アル (総運転回数): 111		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 22	
	リークチェック: 116	自己洗浄: 100	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 17030017			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 - 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	おおわに内科クリニック 院長 水尻 栄 ご署名 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐105-6
---	--

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者	作業者
	R3.12.8