

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211222-G

発行日：令和3年 12 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100606
作業年月日	令和 3 年 12 月 22 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	寺崎内科胃腸科医院 様	TEL： 0191-23-6211
所在地	岩手県一関市青葉1-6-10	ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科	ご担当 瀬川 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/25 オゾン水生成量異常 (E:215)
7/2 殺菌時漏水異常 (E:202)) 特になし

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 6P8
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒ 交換
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

要号なし

装置情報	交換後運転回数： 1888	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 1882	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 2426	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	23
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計	5190B27P	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	タッチパネル		☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 12 月 22 日

ご署名

寺崎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



R3.12.22