

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 09-28938 No. 210630

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 仙台支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	後藤医院 様		機番	300044
環営	所在地	山形県南陽市赤湯 342		納入日	2013年9月05日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年6月04日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年6月22日

修理依頼・不具合内容


電源が入らない

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果

分解点検したところ、直流電源の部品が故障していました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と推察いたします。
この故障に関連するコントロール基板も合わせて交換いたしました。

写真1：交換部品一式

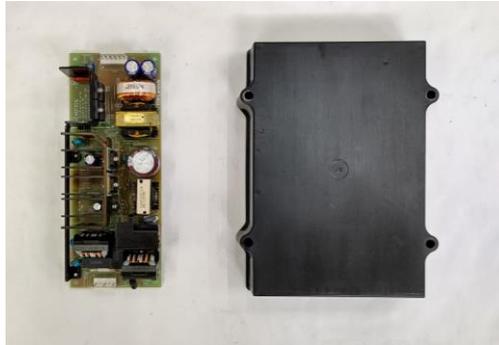

[2] 作業内容

- 1：部品交換 (下表をご参照ください)
- 2：オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.68ppm ・ 正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報
交換後運転回数：629 殺菌：1996、殺菌+アルコール：5078、リークチェック：0
自己洗浄：2182、アルコール単独：6、エア単独：0

承認
松 21.06.30 永
責任技術者
中 21.06.30 澤
作成
R03.6.30 中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1	Ver0209/T05C
	24V電源、	1	