

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20210727-Y

発行日:

2021年7月27日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500341
作業年月日	2021 年 7 月 27 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	堺内科・胃腸科医院 様		TEL:	023-641-8379
所在地	山形県山形市小白川町2-1-65		ご担当	様
販売店	岡崎医療株式会社		ご担当	栗田 様
納入年月日	2019 年 7 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 825
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 150	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 307	消毒 (洗剤洗浄あり): 304
	消毒+アル (総運転回数): 0		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0	
	リークチェック: 301	自己洗浄: 302	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 17112748			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 7 月 27 日

山形市小白川町二丁目1-6

堺内科 胃腸科 医院

ご署名

電話 (041) 8379 番

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

作業者

