

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210917-G

発行日: 令和3年 9 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号: 100041
作業年月日	令和 3 年 9 月 17 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	ゆとりが丘クリニック 様	TEL: 019-699-1122
所在地	岩手県滝沢市土沢541番地	ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科 本社	ご担当 内村 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/1 消毒時 給水異常 (E:202) → 特記不具合なし

不具合原因、作業内容

定期点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 1270
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒ じじり	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常なし × トレー目録

装置情報	交換後運転回数: 534	更新 (セット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 48	殺菌/消毒+7L: 5346
	リークチェック: 47	自己洗浄: 2261	7Lアルコール単独: 1	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計	52002068	☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 17 日

ご署名

近江

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL: 022-288-4660

責任技術者

大友

作業者

R3.9.17
後藤