

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20211119-G
発行日：令和3年 11 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>		製造番号： 300370
作業年月日	令和 3 年 11 月 19 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	さわうち協立診療所 様		TEL： 0197-85-3101
所在地	岩手県和賀郡西和賀町沢内字新町4-16-1		ご担当 様
販売店	株式会社メディケアエコネット		ご担当 及川 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 11 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 5/1 圧力系圧力異常 (E:200) 特記不具合あり
 7/16 排水異常 (E:402) /

不具合原因、作業内容
 定期点検

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 675
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 交換
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 異常あり

装置情報	交換後運転回数： 150	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 441	殺菌/消毒+アル： 1063
	リークチェック： 1504	自己洗浄： 884	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；水槽側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計	15092134	<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ；チューブ側		<input checked="" type="checkbox"/>	2
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。
 2021年11月19日
 ご署名 及川 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
 TEL：022-288-4660

責任技術者 及川
 作業者 R3.11.19 後藤