

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 2022 01 25-⑦

発行日: 2022年 1月 25日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                               |                                                                       | 製造番号: 500213      |
| 作業年月日 | 2022年 1月 25日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間: 1.5 Hr      |
| 顧客名   | 新城胃腸科内科 様                                                                                                                 |                                                                       | TEL: 0177-78-8551 |
| 所在地   | 青森県青森市新城平岡175-23                                                                                                          |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 桜井 様          |
| 納入年月日 | 2019年 2月 20日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 890         |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.96 ppm      |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| 水槽側コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                  |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 0304 / T12A |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

|          |                                                                    |           |                                     |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 802 更新 (リット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 / 未実施 |           | 消毒 (総運転回数): 2397 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 293 |         |
|          | 消毒+アル (総運転回数): 0                                                   |           | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0                   |         |
|          | リークチェック: 1152                                                      | 自己洗浄: 880 | アルコール単独: 0                          | エア単独: 6 |

| 交換部品名称           | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 交換・数量                                 | 交換部品名称  | 交換・数量                                 |
|------------------|-------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| オゾン水濃度計          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | オゾン分解触媒       | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 吸盤      | <input checked="" type="checkbox"/> 3 |
| 交換後 No. 18012997 |                                     |    | 排水栓           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | エアフィルター | <input type="checkbox"/>              |
| オゾンセンサー          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 | <input type="checkbox"/>              | 水フィルター  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
|                  | <input type="checkbox"/>            |    | オゾン水濃度計用フィルタ  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 |         | <input type="checkbox"/>              |
|                  |                                     |    |               | <input type="checkbox"/>              |         | <input type="checkbox"/>              |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022年 1月 25日

ご署名 浪野 東 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL: 022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |