

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年 9月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100049	
作業年月日	平成 23年 9月28日		作業時間	1	Hr
顧客名	浦川原診療所		TEL	025-599-2510	
所在地	新潟県上越市浦川原区有島75		担当	様	
販売店	(株)金森医療器械店		担当	阿部	様
納入年月日	平成 22年 9月 8日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合特になし

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 345
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 77	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 77	殺菌+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 53	7L単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	吸盤		☒	キ3
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H23年 9月 28日

ご署名

高橋

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

山崎

坂井