

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年10月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100118	
作業年月日	平成 23年10月12日		作業時間:	1 h	
顧客名	しまだ医院 様		TEL:	025-555-2622	
所在地	新潟県糸魚川市大字西谷内53-5		担当	様	
販売店	(株)福山ムトウ 様		担当	板倉 様	
納入年月日	平成22年 9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/12 レベルセンサ異常 (解決済)

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 345-
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ ネジ増し締め	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 707	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌: 4	殺菌+7M: 703
	リークチェック: 0	自己洗浄: 299	7M単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

23年 10月 12日

ご署名

日島



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者



H23/10/12

