

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 110204

配布先	納入先	新鋭工業（株）新潟支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	浦川原診療所 様			機番	100049
環営	所在地	新潟県上越市浦川原区有島 75			納入日	平成 22 年 9 月 8 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 23 年 1 月 5 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 23 年 2 月 3 日

修理依頼・不具合内容

12/18 水漏れ（多量）
12/18 排気ファン故障（E:207）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

マニホールドの付け根より水漏れが発生し、そこから出た水が排気ファンにかかって排気ファンが故障しました。
マニホールドを調査したところ、溶接部に不具合がありましたのでこれを交換して復旧いたしました。

写真 1：マニホールド水漏れ部拡大

溶接箇所


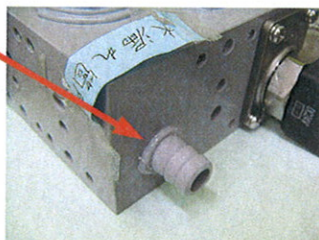


写真 2：交換部品一式

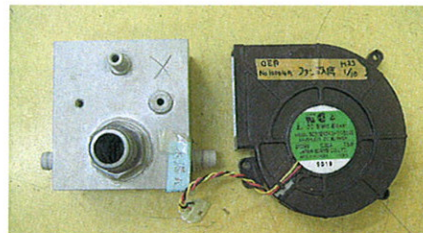

〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表と写真をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.62ppm ・ ・ 正常
- 3：運転確認 ・ ・ ・ ・ ・ 正常

〔3〕出荷時の装置情報

殺菌：25回 殺菌＋アルコール：0回 リークチェック：0回
自己洗浄：14回 アルコール単独：0回 エアパージ単独：1回

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762210250	マニホールドブロック	1	
762301240	排気ファン	1	

承認

江
23.2.-4
口

審査

江
23.2.-4
口

作成

H23. 2. 4
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

December 22, 2010

修 理 依 頼 書

(株)IHI シバウラ 御中

中澤 様



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1

TEL 025-233-0592 FAX 025-233-0573

担当： 坂井

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてご送付いたしますので、よろしくお願いいたします。

敬具

修理依頼品： 内視鏡殺菌機 OED-1000

製造番号： 100049

ユーザー： 浦川原診療所

依頼内容： 水漏れ発生。

本体背面のポンプより上部にある電磁弁が付いているところより、水漏れ確認。

又、自己洗浄をすると排気ファン異常と表示。(漏れ出た水が混入したのでは?)

※水漏れ箇所を付箋で張っときましたので、背面を開けて確認お願い致します。