

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	23年 10月 24日	機種名	ONW-10	製造番号	001147
設置場所	新潟県燕市五千石 3247			TEL	0256-97-5111
納入時期	18年 9月 4日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常 ☒	交換 ☐		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
吸水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音・振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	(濃度: 91 %)	(流量: 0.82 L/min)	(圧力: 0.68-0.98 Mpa)
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内装	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

23年 10月 24日

ご署名 榊 原 医 院



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

日付：23年 10月 24日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 山崎

ONW-10機番：001147

PSA機番：SPS- 10436

客先：榊原医院 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-		合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか？		合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか？		合 / 否
オゾン分解触媒は交換したか？		合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！		合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？		合 / 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）		合 / 否
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）	（ 91 %）	合 / 否
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）	（ 0.82 L/min）	合 / 否
PSA圧力の確認	（ 168 Mpa）～（ 98 Mpa）	参考値
外装の取付		