

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 4月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100180	
作業年月日	平成 24年4月23日		作業時間:	1	h
顧客名	木村医院 様		TEL:	0258-74-2172	
所在地	新潟県長岡市小島谷3343		担当	湧井	様
販売店	(有)エム・イー新潟 様		担当	佐々木	様
納入年月日	平成23年 4月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
昨年9月に「オゾン水生成異常」「濃度維持異常」発生。 吸水フィルタ・設置により改善済み。	
不具合原因、作業内容	
定期メンテナンス実施。 吸水フィルタ・状態確認。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 ☒
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありません。 吸水フィルタは今回様子見。次回点検時には交換した方がよろしいと思います。	

装置 情報	交換後運転回数: 425	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 236	殺菌+7L: 186
	リークチェック: 0	自己洗浄: 207	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	24年 4月 23日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 木村元朗	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	