

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	24年 10月 2日	機種名	ONW-10	製造番号	000123
設置場所	新潟県見附市本町 1丁目2番50号			TEL	0258-62-0123
納入時期	15年 5月 1日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	☒	交換	☐
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
吸水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	(濃度: 93 %) (流量: 0.8 L/min) (圧力: 1.01 ~ 1.70 Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内装	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

24.10.2 -
年 月 日
新潟県見附市本町1丁目2番50号
医療法人 社団 杏仁堂医院
ご署名 理事長 小林 欣也

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

日付：24年 10月 2日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 山崎

ONW-10B 機番：000123

PSA機番：SPS-

客先：杏仁堂医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-	合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか？	合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか？	合 / 否
オゾン分解触媒は交換したか？	合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	合 / 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	合 / 否
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）（ 93 %）	合 / 否
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）（ 0.82 L/min）	合 / 否
PSA圧力の確認（ 101 Mpa）～（ 120 Mpa）	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか？	合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか？	合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	合 / 否
ドレンチューブは接続したか？	合 / 否
確認事項	
フタ・パッキンに剥がれはないか？	合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか？	合 / 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	合 / 否
運転は正常か？ エラーは出ないか？	合 / 否
インジケータの変色は良好か？	合 / 否

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）