

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	24年 10月 5日	機種名	ONW-10	製造番号	001147
設置場所	新潟県燕市五千石 3247			TEL	0256-97-5111
納入時期	18年 9月 4日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	☒	交換	☐
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
吸水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	(濃度: 90%) (流量: 0.8 L/min) (圧力: 98 ~ 174 Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内装	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレンフィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2024年 10月 5日

ご署名 榊原 清



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

日付：24年 10月 5日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 山崎

ONW-10機番：001147

PSA機番：SPS- ¹¹⁰⁹⁴~~10436~~

客先：榊原医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS- 10436	(合) / 否
ドレン用フィルターを交換したか？	(合) / 否
排水シリコンチューブを交換したか？	合 / 否
オゾン分解触媒は交換したか？	(合) / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	(合) / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	(合) / 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	(合) / 否
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）	(90 %) 合 / 否
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）	(0.82 L/min) 合 / 否
PSA圧力の確認	(98 Mpa) ~ (174 Mpa) 参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか？	(合) / 否
フロントパネルのランプは配線したか？	(合) / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	(合) / 否
ドレンチューブは接続したか？	(合) / 否
確認事項	
フタ・パッキンに剥がれはないか？	(合) / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	(合) / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	(合) / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	(合) / 否
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	(合) / 否
別紙 点検確認書に記録したか？	(合) / 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	合 / 否
運転は正常か？ エラーは出ないか？	(合) / 否
インジケータの変色は良好か？	(合) / 否

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）