

点検確認書

株式会社IHシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	24年 10月 10日	機種名	ONW-10B	製造番号	001736
設置場所	新潟県新潟市五十嵐二の町 8218番地23	TEL	025-262-0200		
納入時期	21年 9月 28日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果					
スイッチ類	正常	☒	交換	☐		
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
吸水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☐	(濃度: %)	(流量: L/min)	(圧力: Mpa)	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内装	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

H.24年 10月 10日

樋口内科・消化器科医院

ご署名

樋口 庄市 印

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

日付：24年 10月 10日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 山崎

ONW-10B 機番：001736

PSA機番：SPS-

客先：樋口内科・消化器科医院様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-	合 / 否	
ドレン用フィルターを交換したか？	合 / 否	
排水シリコンチューブを交換したか？	合 / 否	
オゾン分解触媒は交換したか？	合 / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	合 / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	合 / 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	合 / 否	
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）（ %）	合 / 否	
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）（ L/min）	合 / 否	
PSA圧力の確認（ Mpa）～（ Mpa）	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか？	合 / 否	
フロントパネルのランプは配線したか？	合 / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	合 / 否	
ドレンチューブは接続したか？	合 / 否	
確認事項		
フタ・パッキンに剥がれはないか？	合 / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	合 / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	合 / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	合 / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	合 / 否	
別紙 点検確認書に記録したか？	合 / 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	合 / 否	
運転は正常か？ エラーは出ないか？	合 / 否	
インジケータの変色は良好か？	合 / 否	

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）