

点検確認書

株式会社IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

点検年月日	25年 4月 11日	機種名	ONW-10	製造番号	000896
設置場所	新潟県上越市青野239			TEL	025-520-2202
納入時期	17年 11月 9日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常 ☒	交換 ☐		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
吸水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音・振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	(濃度: 93 %) (流量: 0.8 L/min) (圧力: Mpa)		
水漏れ確認				99~165
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☐	清掃 ☒		
内装	正常 ☐	清掃 ☒		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

25年 4月 11日

ご署名 五十嵐医院



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

日付：25年 4月 11日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 坂井

ONW-10機番：000896

PSA機番：SPS-10637

客先：五十嵐医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-	合 / 否
ドレン用フィルターを交換したか？	合 / 否
排水シリコンチューブを交換したか？	合 / 否
オゾン分解触媒は交換したか？	合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	合 / 否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	合 / 否
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）	（ 93 % ） 合 / 否
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）	（ 0.82 L/min ） 合 / 否
PSA圧力の確認	（ 97 Mpa ） ～ （ 165 Mpa ） 参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか？	合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか？	合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	合 / 否
ドレンチューブは接続したか？	合 / 否
確認事項	
フタ・パッキンに剥がれはないか？	合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	合 / 否
別紙 点検確認書に記録したか？	合 / 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	合 / 否
運転は正常か？ エラーは出ないか？	合 / 否
インジケータの変色は良好か？	合 / 否

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）