

長谷川 医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業(株) 坂井

点検年月日	25年9月27日	機種名	ONW-10	製造機番	00/018
設置場所	内視鏡検査室	TEL			
納入時期	18年2月23日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
ランプ類						
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>		
洗浄動作						
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアバージ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
性能確認						
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.5	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>				
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 92 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 10 ~ 20	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
清掃						
外装	正常	<input type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>		
内部	正常	<input type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>		
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

25年9月27日

ご署名 長谷川 坂井



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。