

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年6月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100181	
作業年月日	平成 25年6月26日		作業時間	1 h	
顧客名	竹越内科医院 様		TEL	025-543-3300	
所在地	新潟県上越市五智新町10-24		担当	様	
販売店	カナイ医療器(株) 様		担当	中山 様	
納入年月日	平成23年 5月25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 1回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守点検実施

不具合原因、作業内容
下記点検項目と部品交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☐ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
異常ございません

装置 情報	交換後運転回数： 259	更新（リセット） ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌： 132	殺菌+7L： 386
	リークチェック： 0	自己洗浄： 3	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手（本体）		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手（フェード）		☒	2
脱気フィルター		☒	1			☒	
オゾンセンサー		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 6 月 26 日

ご署名 山崎 淳 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
	坂井