

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年10月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100118	
作業年月日	平成 25年10月23日		作業時間:	1 h	
顧客名	しまだ医院 様		TEL:	025-555-2622	
所在地	新潟県糸魚川市大字西谷内53-5		担当	様	
販売店	(株)福山ムトウ 様		担当	板倉 様	
納入年月日	平成22年 9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 1回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス実施

不具合原因、作業内容

下記項目点検、定期交換部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 694	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 2009-9	殺菌+7L: 2009
	リークチェック: 0	自己洗浄: 805	7L-JL単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (本体)		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (チューブ)		☐	2
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 10月 23日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

