

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 1月 31日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100368
作業年月日	平成 26年 1月 31日		作業時間: 1 Hr
顧客名	小林内科医院		TEL: 025-752-7155
所在地	十日町市中条甲1096-2		担当 院長先生 様
販売店	カナイ医療器(株) 長岡		担当 猪浦 様
納入年月日	平成 24年 11月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体背面 サビ有り。

不具合原因、作業内容

特にナシ。
保守点検作業 実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☐ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 592	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 255	殺菌+7L: 338
	リークチェック: 2	自己洗浄: 226	7L単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 79910-8815 新潟県十日町市十日町 2014年1月31日
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

区役所 十日町市役所
TEL 025-752-7155 FAX 025-752-7155

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町 1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者 2014/1/31
作業者 2014/1/31

