

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140625

発行日 平成 26年 6月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100266
作業年月日	平成26年 6月 24日		作業時間:	Hr
顧客名	谷口医院	様	TEL: 0258-83-0111	
所在地	新潟県小千谷市大字稗生乙933-7		担当	様
販売店	源川医科器械 株式会社	様	担当	様
納入年月日	平成 23年 5月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	電源コード
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 3回目		定期点検シム記入 ☒	
出張 ☒ 引取	修理 ☒			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/19 機械の電源が入らない状態になった

不具合原因、作業内容

- ・タッチパネルの故障が原因で電源が入りませんでした。
- ・定期保守点検を実施いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 S36
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	絶縁、通電テスト合格
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タッチパネルはメーカーに送付して原因調査と運転データが復旧できるか相談します。

装置 情報	交換後運転回数:	☐ 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌:	4	殺菌+7L:	1
	リークチェック:	1	自己洗浄:	1	7L+L単独:	0
				エア単独:	0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	タッチパネル		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ (40mm)		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年 6月 20日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

