

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年6月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100181	
作業年月日	平成 26年6月25日		作業時間:	1 h	
顧客名	竹越内科医院 様		TEL:	025-543-3300	
所在地	新潟県上越市五智新町10-24		担当	様	
販売店	カナイ医療器(株) 様		担当	中山 様	
納入年月日	平成23年 5月25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検実施。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常ございません。

自己洗浄の回数が少なく見受けられます。1日の最後に自己洗浄をお願い致します。

装置情報	交換後運転回数: 242	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 144	殺菌+7L: 616
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(フェード)		☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 6 月 25 日

ご署名 医療法人社団 竹越内科医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者 作業者

