

点検確認書

金子クリニック

御中

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

点検年月日	26年 7月 4日	機種名	ONW-10	製造番号	000308
設置場所	新潟県魚沼市田尻 164-2			TEL	025-799-2015
納入時期	15年 7月 1日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常 ☒	交換	☐	
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
吸水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音・振動	正常 ☐	調整	☒	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☐	濃度	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	(濃度: 90 %)	(流量: 7.0 L/min)	(圧力: 92 ~ 165 Mpa)
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内装	正常 ☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレンフィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

26年 7月 4日
新潟県魚沼市田尻164-2

医療法人社団 金子クリニック

ご署名

理事長 金子一郎



*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

日付：26年 7月 4日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 山崎

ONW-10B 機番：000308

PSA機番：SPS- 11161

客先：金子クリニック 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-	合 / 否	
ドレン用フィルターを交換したか？	合 / 否	
排水シリコンチューブを交換したか？	合 / 否	
オゾン分解触媒は交換したか？	合 / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	合 / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	合 / 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	合 / 否	
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）	合 / 否	90 %
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）	合 / 否	2.0 L/min
PSA圧力の確認	合 / 否	92 Mpa ～ 165 Mpa 参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか？	合 / 否	
フロントパネルのランプは配線したか？	合 / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	合 / 否	
ドレンチューブは接続したか？	合 / 否	
確認事項		
フタ・パッキンに剥がれはないか？	合 / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	合 / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	合 / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	合 / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	合 / 否	
別紙 点検確認書に記録したか？	合 / 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	合 / 否	
運転は正常か？ エラーは出ないか？	合 / 否	
インジケータの変色は良好か？	合 / 否	

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）