

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年7月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100310
作業年月日	平成 26年7月23日	作業時間:	1 h
顧客名	羽尾内科医院 様	TEL:	025-532-4031
所在地	新潟県上越市三和区下中677-1	担当	様
販売店	(株)福山ムトウ 様	担当	金木 様
納入年月日	平成25年 7月24日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません

装置 情報	交換後運転回数: 242	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 242	殺菌+7A: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 156	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (本体)		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (7-7)		☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26.7.23 月 日
F943-0222
新潟県上越市三和区下中677-1
羽尾内科医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

羽尾 真 技術 作業
TEL(025)532-4031
坂
26.7.23
井