

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年7月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100311
作業年月日	平成 26年7月25日	作業時間:	1 h
顧客名	さいとう内科クリニック 様	TEL:	0256-91-0016
所在地	新潟県燕市吉田法花堂1696-4	担当	様
販売店	エムサポート(株) 様	担当	八木 様
納入年月日	平成25年 8月 5日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

~~定期保守点検実施~~

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒
酸素ライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒
給水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒
水位センサー	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒
清掃	正常	☐
トレー	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒

殺菌槽 LED	正常	☒
エアライン	正常	☒
オゾン水濃度計動作	正常	☒
排水栓、排水ライン	正常	☒
細管送水ライン	正常	☒
排気ライン	正常	☒
オゾン濃度	正常	☒
異常音、振動	正常	☒
電源コード	正常	☒
殺菌チューブ類	正常	☒

バルブ数
履歴 0.71 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません

装置 情報	交換後運転回数: 52	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 2	殺菌+AL: 49
	リークチェック: 2	自己洗浄: 50	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ)		☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 7月 25日

ご署名

齊藤 初美

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

坂
26.7.25
井