

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年11月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100118	
作業年月日	平成 26年11月 6日		作業時間:	1 h	
顧客名	しまだ医院 様		TEL:	025-555-2622	
所在地	新潟県糸魚川市大字西谷53-5		担当	様	
販売店	㈱福山ムトウ 様		担当	清水 様	
納入年月日	平成22年 9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年 1回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期交換部品の交換、各部点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。

装置 情報	交換後運転回数: 769	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 12	殺菌+7L: 2770
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1077	7Lコル単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ)		☒	2
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

島田長樹



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

坂井