

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 11月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100368
作業年月日	平成 26年 11月 18日	作業時間: / Hr
顧客名	小林内科医院	TEL: 025-752-7152
所在地	新潟県十日町市中条甲1096-2	担当 院長先生 様
販売店	カナイ医療器(株) 長岡営業所	担当 酒井 様
納入年月日	平成 24年 11月 26日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ナシ。

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサー	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

殺菌槽 LED	正常 ☒	
エアライン	正常 ☒	
オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数
排水栓、排水ライン	正常 ☒	
細管送水ライン	正常 ☒	
排気ライン	正常 ☒	
オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.74 ppm
異常音、振動	正常 ☒	
電源コード	正常 ☒	
殺菌チューブ類	正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期点検実施。

アルコールタンクキャップ破損。後日交換。

装置 情報	交換後運転回数: 369	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 392	殺菌+アル: 570
	リークチェック: 2	自己洗浄: 391	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサー		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26.11.18 月 日

小林内科医院
小林 次雄

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

技術者 山崎 26.11.18 崎	作業者 山崎 26.11.18 崎
----------------------	----------------------