

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年 2月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100049
作業年月日	平成 27年 2月25日		作業時間:	1 h
顧客名	浦川原診療所 様		TEL:	025-599-2510
所在地	新潟県上越市浦川原区有島75番地		担当	様
販売店	(株)金森医療器械店 様		担当	阿部 様
納入年月日	平成22年 9月 8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4年 4回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期メンテナンス時期

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 321
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 20.25 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ございません。 次回は平成28年2月の点検になります。

装置 情報	交換後運転回数: 151		更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 532	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 217		アルコール単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	コネクタ継手(本体)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ)		☒	2
脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 2 月 25 日

ご署名 高橋 龍一

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
	坂 27.2.25 井