

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27年 4月 21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000-S			製造番号：	300094
作業年月日	平成 27 年 4 月 21 日			作業時間：	Hr
顧客名	吉田医院			TEL：	0258-31-1010
所在地	新潟県長岡市榎田屋1-4-42			担当	院長先生
販売店	アルフレッサ㈱長岡支店			担当	長田 様
納入年月日	平成 26年 4月 4日	保証期間	内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ナシ。

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 80%
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

完了。

装置 情報	交換後運転回数： 1135		更新 (リセット) 実施 ・ 未実施		殺菌：	707	殺菌+7L：	430
	リークチェック：	0	自己洗浄：	287	7L単独：	4	エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換 ☒	数量	交換部品名称	部品コード	交換 ☒	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 7 月 4 日 21 日

ご署名 吉田 正弘



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者



作業者

