

点検確認書

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

点検年月日	27年 07月 16日	機種名	ONW-10	製造番号	000407
設置場所	新潟県糸魚川市東寺町1-4-6			TEL	025-553-1030
納入時期	17年 06月 13日	使用回数		御対応者様	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	正常	☒	交換	☐
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☐	調整	☐
吸水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音・振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	(濃度: 92 %) (流量: 0.8 L/min) (圧力: 1.5 Mpa)	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内装	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	フタ一式交換致しました。
吸湿筒	一式	
ドレンフィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

新潟県糸魚川市東寺町1丁目4番6号
年 月 日

医療法人社団 ひまわり内科

ご署名 理事長 森田 英 

*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 坂井

日付：27年 07月 16日

作業者：新鋭工業(株)

新潟支店 坂井

ONW-10機番：000407

PSA機番：SPS-11782

客先：ひまわり内科 様

定期交換部品			
吸着筒と吸湿筒を交換したか？（取り外したPSA機番を記入 SPS-11091	☒	合 / 否	
ドレン用フィルターを交換したか？	☒	合 / 否	
排水シリコンチューブを交換したか？	☒	合 / 否	
オゾン分解触媒は交換したか？	☒	合 / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか？ 再確認の事！	☒	合 / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？ 確実に取り付いているか？	☒	合 / 否	
PSA性能確認			
圧力スイッチのゼロ点は合っているか？（±0.005Mpa以内）	☒	合 / 否	
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上）	(92)	%	☒ 合 / 否
酸素流量は適切か？（0.73～0.82L/min）	(0.81)	L/min	☒ 合 / 否
PSA圧力の確認	(100)	Mpa	～ (150) Mpa 参考値
外装の取付			
オゾンセンサーは配線したか？	☒	合 / 否	
フロントパネルのランプは配線したか？	☒	合 / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か？	☒	合 / 否	
ドレンチューブは接続したか？	☒	合 / 否	
確認事項			
フタ・パッキンに剥がれはないか？	☒	合 / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン・Oリングは正常か？	☒	合 / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか？（汚れのある場合）	☒	合 / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか？	☒	合 / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか？（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	☒	合 / 否	
別紙 点検確認書に記録したか？	☒	合 / 否	
確認試験			
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	☒	合 / 否	
運転は正常か？ エラーは出ないか？	☒	合 / 否	
インジケータの変色は良好か？	☒	合 / 否	

不具合内容・特記事項（否の場合、NOと共に理由を記入）